



Van neus-maag sonde naar Tummy Button

Marco Kropman

Medilime®




Medilime®

Neus-maagsonde




Percutane Endoscopische Gastrostomie

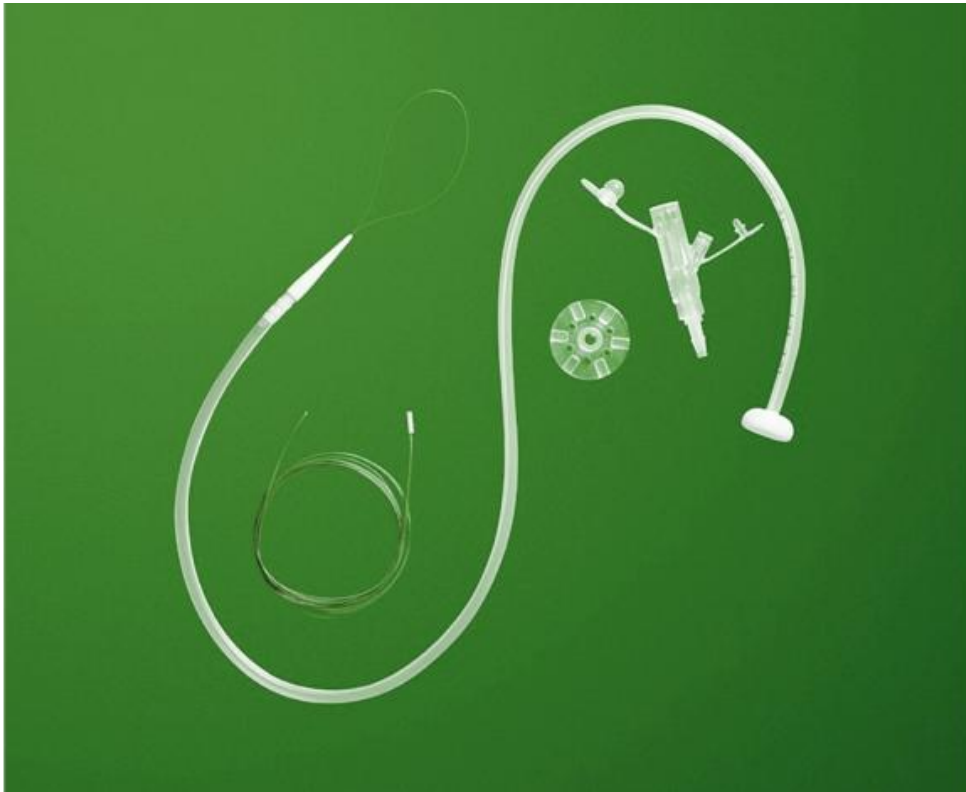

Medilime®

PEG | Klassieke pull- methode

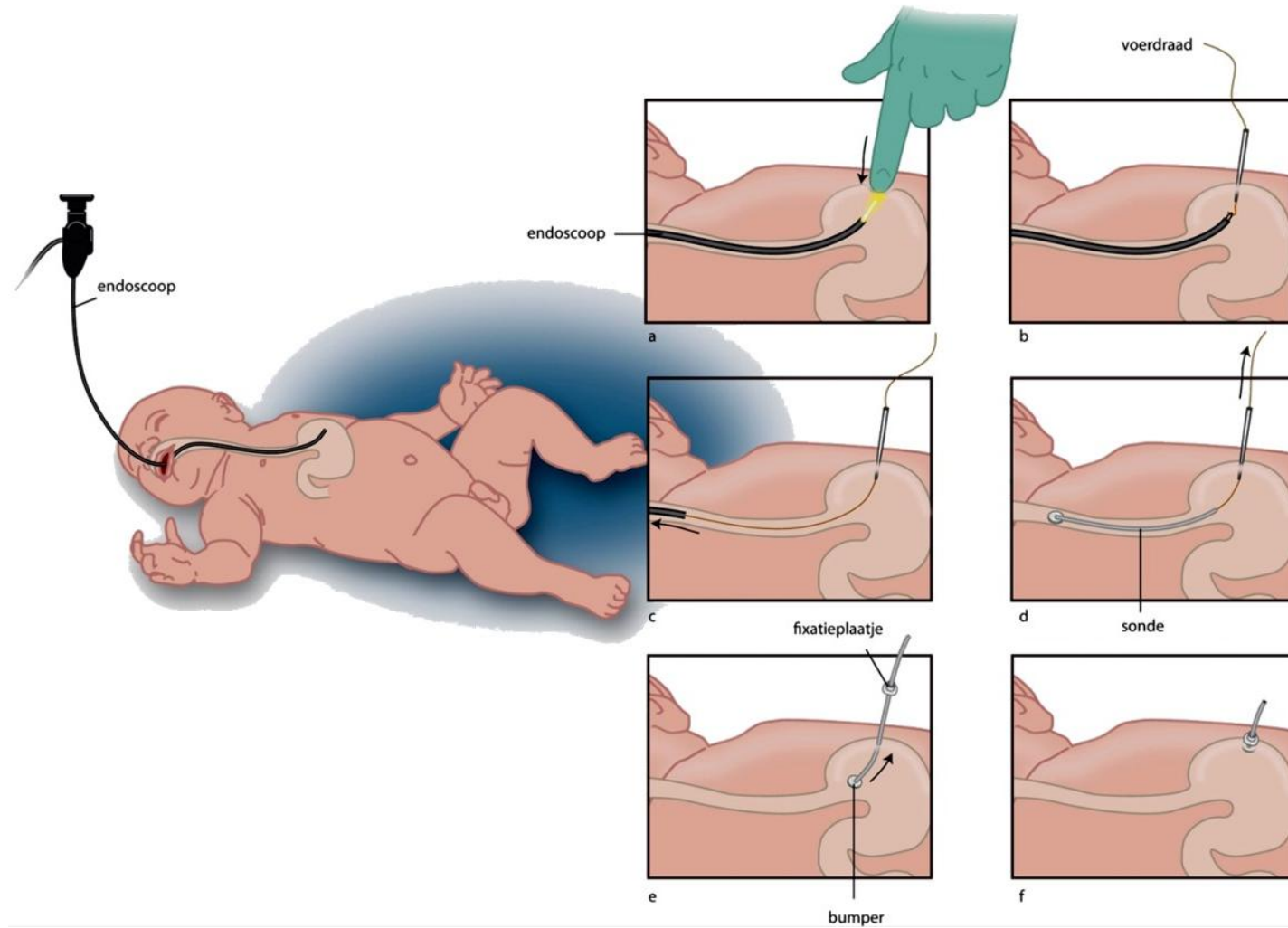

Indicaties

- Chronische ziekte kinderen
- Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
- Crohn (ontstekingen in de darmen)
- Oncologische patiënten
- Psychomotore retardatie met voedingsproblemen
- Spierziekten
- Voedselweigering
- Stofwisselingsstoornis
- Obstipatie (toedienen medicatie)



Medilime®

PEG-sonde voor- en nadelen

Voordelen

- Geen last van sonde in gezicht
- Blijft goed zitten
- Gemakkelijk in gebruik

Nadelen

- 1-2 x gastroscopie onder narcose nodig
- Onnatuurlijke opening
- Verzorging vergt aandacht
 - Irritatie, ontsteking, wildvlees
- Aanvankelijk lange, dikke sonde op de buik



Medilime®

Verzorging PEG-sonde

1e week na plaatsing (protocol ziekenhuis)

- Sonde de eerste week zo min mogelijk bewegen
- Controleer elke dag de huid op zwelling, roodheid en irritatie
- Na 2 dagen de insteekopening reinigen met natte gazen, externe plaatje laten zitten
- Eerste week niet douchen of in bad
- Na elke voeding met 20 tot 30 ml lauw water doorspoelen

Na de eerste week

- Fixatieplaatje iets losser zetten, 2 mm boven de huid (euromunt)
- Elke dag draaien en dompelen
- Protocol Vilans



G-tubes



G-tubes



Medilime®

MediLime Tummy Button




MediLime Tummy Button



Appelvormig VS Peervormig



MediLime Tummy Button

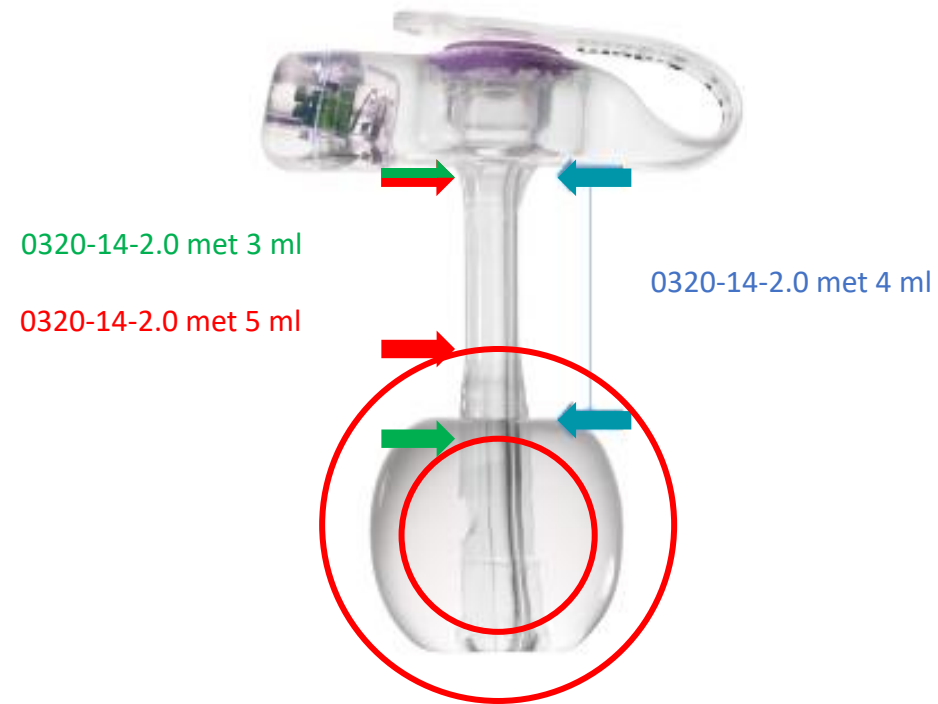


MediLime meetkatheter

- 0325-00 per 2 stuks
- Meten in liggende en zittende positie



MediLime verlengslangen

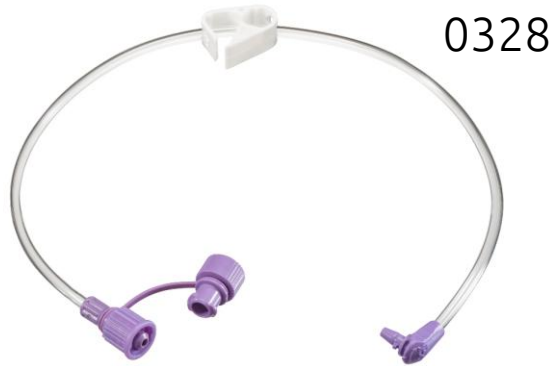

MediLime verlengslangen



High flow button aansluiting





Bedankt!

Medilime®